

# Wunden richtig versorgen



# Inhalt

Welche Faktoren begünstigen die Wundheilung?	04
Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Wundverbände?	06
Kann ich meinen Wundverband selbst wechseln?	08
Vorbereiten des Verbandwechsels	08
Durchführen des Verbandwechsels	10
Wie häufig sollte der Verband gewechselt werden?	14
Worauf ist beim Verbandwechsel zu achten?	15

# In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zum Verbandwechsel daheim.

Auch wenn Sie Ihre Wunde zuhause selbst versorgen, sollten Sie für eine optimale und zeitnahe Heilung die behandelnde medizinische Fachkraft bzw. Ihren Arzt stets auf dem Laufenden halten. Dieser Austausch ist für Ihre Wundversorgung sehr hilfreich. Darüber hinaus enthält diese Broschüre wichtige Informationen für einen sicheren Verbandwechsel, wenn ein Hausbesuch durch eine medizinische Fachkraft nicht möglich ist und Sie oder eine Sie pflegende Person diesen durchführen muss.

**Gegebenenfalls sollten Sie die Wunde zusätzlich von einer medizinischen Fachkraft untersuchen lassen und Ratschläge zu Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand einholen, um den Heilungsprozess zu fördern.**

Haftungsausschluss:

Der Verband sollte von medizinischem Fachpersonal angelegt werden. Ist eine solche Person nicht verfügbar, muss der Verbandwechsel ggf. durch den Patienten selbst oder ein Familienmitglied erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Anwendung des Verbands durch Laien. Wird der Verband von einer Person angelegt, die keinen medizinischen Beruf ausübt, geschieht dies daher ausschließlich auf eigenes Risiko.

# Welche Faktoren begünstigen die Wundheilung?

---

## » Beispiele:

- Kein Tabakkonsum
- Ausgewogene und gesunde Ernährung
- Regelmäßige Bewegung im Rahmen der eigenen Möglichkeiten
- Erholsamer Schlaf

Die Wundheilung kann sich aufgrund verschiedener Faktoren verzögern. Diese können sowohl Ihren allgemeinen Gesundheitszustand als auch den Zustand der Wunde betreffen.



Für eine gute  
Wundheilung  
sollte die Wunde  
feucht gehalten  
werden.

# Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Wundverbände?

---

## » Vorteile von speziellen Wundverbänden:

- Physischer Schutz der Wunde
- Feuchthaltung der Wunde sowie schmerz- und komplikationsfreies Entfernen
- Längere Tragedauer zur Unterstützung der Wundheilung\*
- Absorption der Wundflüssigkeit und Schutz der Kleidung
- Angenehmes Tragegefühl

\* Je nach Zustand der Wunde und der wundumgebenden Haut oder entsprechend der gängigen klinischen Praxis



Der Verband  
schützt  
Ihre Wunde.

# Kann ich meinen Wundverband selbst wechseln?

---


Ja. Sie können Ihren Verbandwechsel selbst vornehmen, wenn hierfür kein medizinisches Fachpersonal zur Verfügung steht. Falls möglich, sollte Ihnen dabei ein Familienmitglied oder eine pflegende Person helfen.

## Vorbereiten des Verbandwechsels

Sie können die folgenden Schritte in einer bequemen Sitzposition ausführen. Beachten Sie, dass Sie für den Verbandwechsel nur sterile Materialien verwenden um Verschlechterungen der Wundsituation (z. B. Wundinfektionen) zu vermeiden.

- » Zur Entsorgung des alten Verbandes und der Einweghandschuhe sollten Sie einen Abfallbehälter bereitstellen.
- » Halten Sie alle für den Verbandwechsel benötigten Materialien auf einer gereinigten und desinfizierten Fläche bereit. Dazu zählen z. B. der neue Verband (Verpackung noch nicht öffnen), Einweghandschuhe, Handdesinfektionsmittel und Kompressen.



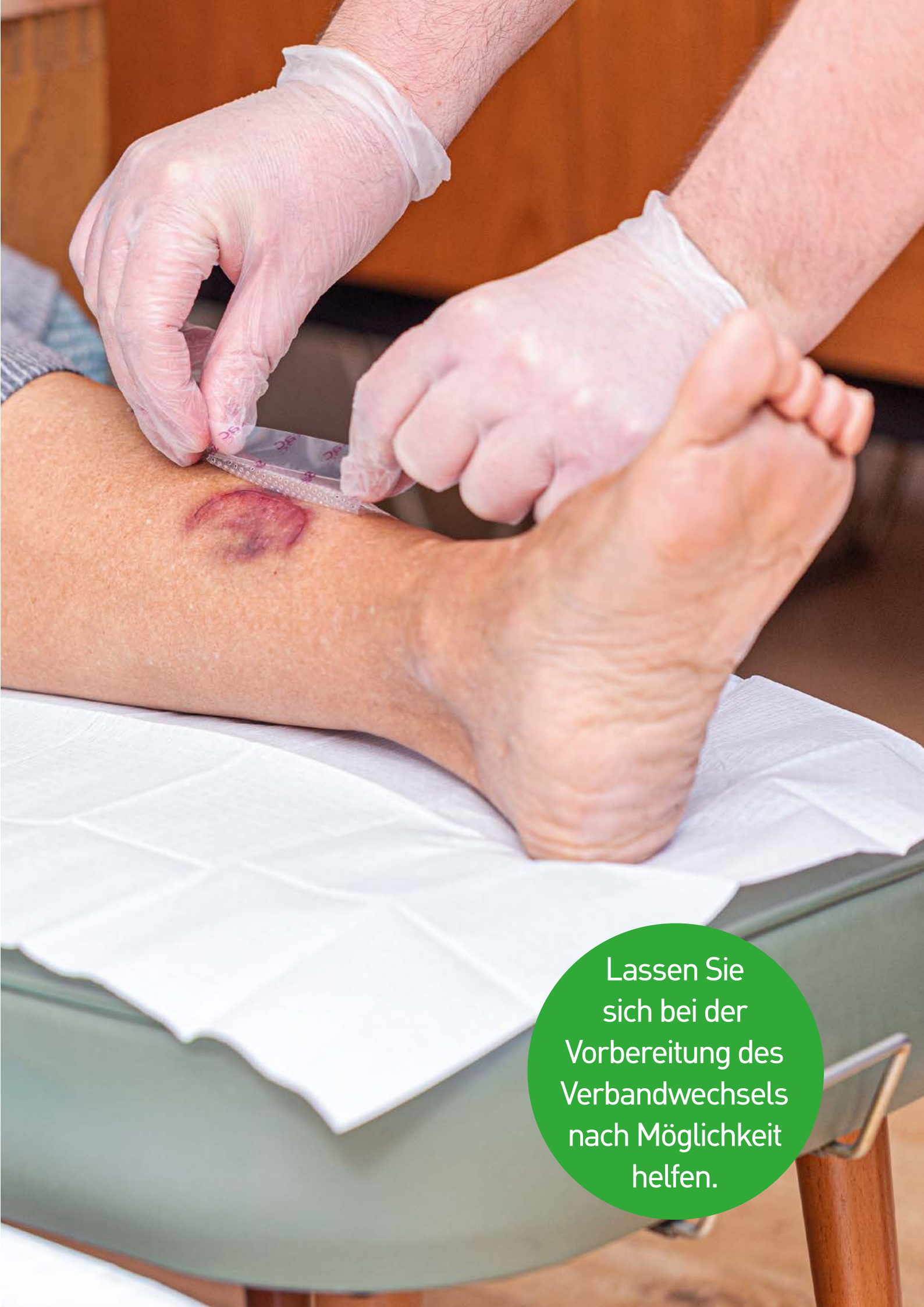

Lassen Sie  
sich bei der  
Vorbereitung des  
Verbandwechsels  
nach Möglichkeit  
helfen.

## Durchführen des Verbandwechsels

- » Waschen Sie Ihre Hände etwa 30 Sekunden lang gründlich mit Wasser und Seife, insbesondere die Bereiche zwischen den Fingern und die Handinnenflächen.
- » Wichtig:  
Trocknen Sie Ihre Hände mit einem sauberen Tuch ab.



- » Desinfizieren Sie Ihre Hände mit einem geeigneten Händedesinfektionsmittel und ziehen Sie Einweghandschuhe an.



## » Alten Verband entfernen

- 1.** Halten Sie Ihre Haut direkt oberhalb des Verbands fest und ziehen Sie den Verband langsam von der Haut ab. Verwenden Sie bei Bedarf etwas physiologische Kochsalzlösung, damit sich der Verband leichter von der Haut löst.
- 2.** Entsorgen Sie den alten Verband zusammen mit den Einweghandschuhen.



# Durchführen des Verbandwechsels

## » Wunde reinigen

BERÜHREN SIE DIE WUNDE NICHT DIREKT MIT IHREN HÄNDEN.

1. Verwenden Sie ein neues Paar Einweghandschuhe.
2. Feuchten Sie sterile Kompressen mit der Wundspüllösung an und platzieren Sie die feuchten Kompressen auf der Wunde und halten Sie die angegebene Einwirkzeit Ihrer Wundspüllösung, lt. Beipacktext, ein. Nehmen Sie bei Bedarf feuchte Kompressen um die wundumgebende Haut zu reinigen.
3. Tupfen Sie die wundumgebende Haut mit einer trockenen Kompresse ab und entsorgen Sie diese.
4. Begutachten Sie die Wunde (sieht sie anders aus, riecht anders oder fühlt sich anders an, siehe Seite 16). Sie können im Zweifel ein Foto machen und an Ihre medizinische Fachkraft senden.



## » Neuen Verband anlegen


1. Desinfizieren Sie Ihre Hände mit einem geeigneten Händedesinfektionsmittel und ziehen Sie Einweghandschuhe an.
2. Nehmen Sie den Verband aus der Verpackung und ziehen Sie eine Hälfte der Schutzfolie ab.
3. Platzieren Sie diese Seite des Verbands auf der Wunde und der wundumgebenden Haut.
4. Entfernen Sie nun auch die andere Hälfte der Schutzfolie und stellen Sie sicher, dass der Verband die Wunde vollständig bedeckt.
5. Prüfen Sie, ob der Verband auf allen Seiten dicht abschließt und tragen Sie bei Bedarf eine Feuchtigkeits-/Pflegecreme auf die wundumgebende Haut auf.
6. Waschen Sie Ihre Hände.



# Wie häufig sollte der Verband gewechselt werden?

---

- » Tragen Sie den Verband so lange wie möglich bzw. entsprechend den Empfehlungen einer medizinischen Fachkraft. Üblicherweise erfolgt 1–3 Mal pro Woche ein Verbandwechsel.
- » **In den folgenden Fällen sollten Sie umgehend einen Verbandwechsel durchführen:**
  - Wenn unter dem Rand des Verbands Flüssigkeit austritt
  - Wenn sich der Verband von der Haut löst



Tragen Sie den  
Verband so lange  
wie möglich.

# Worauf ist beim Verbandwechsel zu achten?

---

## » Folgende Anzeichen deuten auf eine Infektion der Wunde hin:

- stärkere Schmerzen
- mehr Wundflüssigkeit als zuvor
- Schwellung/Rötung der wundumgebenden Haut
- zunehmend unangenehmer Geruch
- Überwärmung der Wunde

## » Weitere Faktoren, die die Wundheilung beeinträchtigen:

- Entwicklung von gelblichem oder schwarzem Gewebe

Kontaktieren Sie bei Anzeichen einer Infektion umgehend eine medizinische Fachkraft.

# Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.at](http://www.molnlycke.at)

Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien  
Tel +43 1 278 85 42-0, Fax +43 1 278 85 42-199, [info.at@molnlycke.com](mailto:info.at@molnlycke.com)  
Mölnlycke Health Care sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
© 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

